

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Vi preghiamo di rispettare le seguenti norme per l'uso del sistema a ossigeno liquido HEIMOX®.



Non fumare in presenza dei contenitori stazionari o portatili per ossigeno liquido.

Tenere lontane le sigarette accese o il tabacco acceso dalla zona di utilizzazione.



Tenere lontani i contenitori dai materiali infiammabili.

Oli e grassi, comprese le creme per il viso grasse e la vaselina, sono facilmente infiammabili e bruciano con estrema rapidità in presenza di ossigeno concentrato. Non cercare mai di oliare il contenitore.



Evitare il contatto con l'ossigeno liquido o con le parti del contenitore che sono state a contatto con l'ossigeno liquido.

L'ossigeno liquido è estremamente freddo (-183°C). Il contatto con l'ossigeno liquido o con le parti del contenitore che sono state a contatto con l'ossigeno liquido può provocare ustioni da freddo.




Gas non combustibile, non tossico.

L'ossigeno è un gas non combustibile e non tossico, che però accelera fortemente la combustione di altre sostanze.



Pericolo: accelera la combustione.

Un'alta concentrazione di ossigeno può provocare una combustione estremamente rapida di altre sostanze.

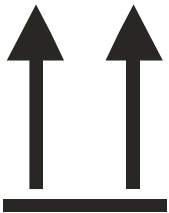

Conservare ed utilizzare i contenitori stazionari e portatili esclusivamente in posizione verticale.

(Non vale per i contenitori portatili T300 e T850) – In caso di caduta dell'unità stazionaria o dell'apparecchio portatile, ventilare bene il locale ed avvertire PanGas Healthcare.



Tenere i contenitori ad una distanza di almeno 1,5 m dagli apparecchi elettrici.

Utilizzare e conservare l'unità stazionaria e il contenitore portatile ad una distanza di almeno 1,5 m dagli apparecchi elettrici che possono emettere calore o scintille.



Tenere lontani i contenitori dalle fiamme libere.

Le fonti di calore come fornelli o forni possono contenere fiamme libere.



Conservare i contenitori esclusivamente in ambienti ben ventilati e asciutti.


I contenitori emettono piccole quantità di ossigeno, che devono essere smaltite tramite una buona ventilazione del locale.

Non conservare mai i contenitori di ossigeno liquido in armadi, bagagliai di auto o altri locali chiusi. Non appoggiare indumenti o tende sui contenitori.



Non portare i contenitori portatili sotto gli indumenti.

Gli apparecchi emettono regolarmente ossigeno. Se il contenitore di ossigeno è coperto dagli indumenti, questi ultimi possono riempirsi di ossigeno ed infiammarsi rapidamente in caso di contatto con una fonte di ignizione.

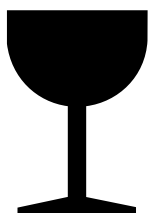

I contenitori sono fragili.

Maneggiare con cautela.



Non cercare mai di risolvere un problema di funzionamento senza l'aiuto di un esperto.

In caso contrario PanGas declina qualsiasi responsabilità.



I contenitori portatili e stazionari pieni di ossigeno liquido sono idonei ad essere trasportati.

Tenere presente che i contenitori stazionari devono essere trasportati tassativamente in posizione verticale.

Evitare tassativamente di fumare e tenere lontana qualsiasi fonte di ignizione. PanGas rimanda espressamente alle vigenti disposizioni SDR/ADR per il trasporto delle merci pericolose e declina qualsiasi responsabilità, in particolare per il trasporto privato dei contenitori stazionari.